

L'ERGOBACK VÉHICULES

L'Ergoback Véhicules est un dossier pour voiture avec maintien lombaire. Il absorbe les chocs, les pressions et les vibrations et permet de s'emmitoufler et de relâcher le dos, limitant ainsi les tensions musculaires. L'Ergoback Véhicules permet de soulager et de limiter les douleurs liées à des pathologies telles qu'une hernie discale, une sciatique ou encore un tassement vertébral.



Désignation produit	Ergoback Véhicules
Gamme	Gamme Véhicules
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garanties constructeur 2 ans, poches de fluide garanties 5 ans.

MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	I	H	Ép.	Poids	Poches de fluide
2035	45 cm	60 cm	2,5 cm	1,785 kg	8
2045	45 cm	47 cm	2,5 cm	1,330 kg	6
2022	sur mesures				

Composition

 AVERTISSEMENT	
	<p>Risque d'asphixie</p> <p>La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu.</p> <p>Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.</p>

Insert	<ul style="list-style-type: none">• Poches de fluide Haute Viscosité normé Codex• Mousse viscoélastique 50 kg/m³
Housse	<ul style="list-style-type: none">• Tissu 3D anti-sudation en contact avec le dos• Anti-dérapant en contact avec le siège• Tissu non-tissé pour l'intérieur de la housse

UTILISER L'ERGOBACK VÉHICULES

1. Positionnez votre Ergoback Véhicules sur le dossier du véhicule en plaçant la sangle derrière l'appui-tête du siège. Le maintien lombaire doit être positionné contre le dossier du siège.
2. Réglez la hauteur de l'Ergoback Véhicules à l'aide de la sangle.
3. Réglez la hauteur du maintien lombaire grâce au velcro.

ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Ergoback Véhicules dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

La housse de votre Ergoback Véhicules est déhoussable mais contient les poches de fluide et doit donc être lavée à la main.