

L'ERGOFIX

L'Ergofix est un support d'avant-bras à fixer sur l'accoudoir d'un fauteuil ou d'une chaise de bureau. Il a été conçu pour les personnes avec un bras inerte ou à mobilité réduite et permet de maintenir le bras sans effort et en limitant le risque d'escarres.



Désignation produit	Ergofix
Gamme	Solutions thérapeutiques
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garanties constructeur 2 ans. Poches de fluide garanties 5 ans

MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	I	L	H	Ép.	Poids
2011	12 cm	28 cm	2 cm	2 cm	0,950 kg
2022	sur mesures				

Composition

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque d'asphyxie</p> <p>La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu. Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.</p>
Insert	<ul style="list-style-type: none">• Mousse Haute Résilience 40 kg/m3• Mousse Haute Résilience 60 kg/m3 (parois)• Poche de fluide Haute Viscosité normé Codex
Housse	<ul style="list-style-type: none">• Tissu 3D anti-sudation sur le dessus• Indéchirable sur les côtés• Anti-dérapant sur le dessous
Fixation	Sangles réglables

POSITIONNER ET UTILISER L'ERGOFIX

1. Positionnez l'Ergofix sur l'accoudoir de manière à ce que le poignet repose sur l'extrémité arrondie.
2. Fixez l'Ergofix sur l'accoudoir du fauteuil à l'aide des sangles.

ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Ergofix dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

En cas de besoin, lavez l'Ergofix à la main avec de l'eau et du savon.

La housse de votre Ergofix est déhoussable et peut être lavée en machine à 30° ou à la main. Si votre Ergofix s'imbibe de liquide, déhousssez-le et laissez sécher la mousse à l'air libre pendant 24h.