

L'ERGOLOMB VÉHICULES

L'Ergolomb Véhicules est un maintien lombaire pour voiture à placer directement sur le siège de votre véhicule. L'Ergolomb Véhicules permet de maintenir et de soulager le dos pendant la conduite en plus d'absorber les chocs et vibrations, ce qui permet de prévenir l'apparition des douleurs. L'Ergolomb Véhicules épouse la courbure du dos et est réglable en hauteur pour s'adapter à chaque individu.



Désignation produit	Ergolomb Véhicules
Gamme	Gamme Véhicules
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garanties constructeur 2 ans, poche de fluide garantie 5 ans.

MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	I	H	Ép.	Poids
2017	35,5 cm	22 cm	2 cm	0,680 kg
2022	sur mesures			

Composition

Insert	<ul style="list-style-type: none">Poche de fluide Haute Viscosité normé CodexMousse viscoélastique 85 kg/m3
Housse	<ul style="list-style-type: none">Tissu 3D anti-sudation en contact avec le dosIndéchirable pour les sangles de réglages et partie en contact avec le siège
Fixation	Sangles réglables et velcro

UTILISER L'ERGOLOMB VÉHICULES

1. Positionnez votre Ergolomb sur le dossier. Le Tissu 3D anti-sudation doit être en contact avec votre dos.
2. Réglez la hauteur de l'Ergolomb Véhicules à l'aides des sangles. Le produit doit être positionné sur vos lombaires.
3. Fixer l'Ergolomb Véhicules sur le dossier du siège grâce à la bande de velcro.

ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Ergolomb Véhicules dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

La housse de votre Ergolomb Véhicules n'est pas déhoussable. Vous pouvez laver votre produit à la main avec de l'eau et du savon.

Nous fabriquons aussi des sacs de transport sur mesures pour transporter votre Ergolomb Véhicules facilement et sans risque de l'abîmer.